



Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха
для применения в стационарных условиях

ТУ9398-002-00149535-2007, РУ№ФСР2007/00032 от 19.03.2007



ISO 9001:2008

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ИЭ)

1 Назначение

Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха для применения в стационарных условиях предназначен для временной остановки кровотечения.

2 Эксплуатация

Перед применением жгут следует продезинфицировать двукратным протиранием салфеткой из бязи или марли, смоченной в 3%-ном растворе перекиси водорода с 0,5% моющего средства («Новость», «Лотос» и др.), с интервалом между протиранием 10-15 мин. Температура дезинфицирующего раствора должна быть не менее 18°C. Дезинфицирующий раствор должен применяться однократно.

3 Хранение

Жгут следует хранить в помещении при температуре от 0 до 25°C и относительной влажности не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Жгут не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, масел, кислот, щелочей, бензина и др. веществ, разрушающих резину.

Гарантийный срок годности жгута – 5 лет со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации жгута – 1 год со дня продажи в пределах гарантийного срока годности.

Юридический адрес:

ОАО «Объединение Альфапластик»

Россия, 107150, Москва, 4-й проезд Подбельского, д.3



4 601835 000485