



Круг резиновый подкладной для ухода за больными КРП-«Альфа»



ISO 9001:2008

ТУ 9398-034-00149535-2006, РУ № ФСР 2011/12155 от 20.10.2011

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Назначение

Круг резиновый подкладной предназначен для медицинских процедур.
Размеры круга: внешний \varnothing — 300 мм; внутренний \varnothing — 95 мм.

2. Эксплуатация

Перед применением круг дезинфицируют погружением изделия в 1% по массе раствор хлорамина при температуре не ниже плюс 18°C на 30+5 мин. После дезинфекции изделие промывают проточной водой. В течении суток круг должен выдерживать не более трех дезинфекций.

Наполнить круг воздухом. Плотно вставить пробку.

Максимальная нагрузка на круг 120 кг. Максимальное время нагрузки на изделие - 1 час.

3. Хранение

Круг следует хранить в помещении при температуре от 0 до плюс 25°C и относительной влажности воздуха не выше 80% на расстоянии не менее 1 м. от нагревательных приборов. Круг не должен подвергаться действию прямых солнечных лучей, масел, бензина, кислот, щелочей и других веществ разрушающих резину.

Срок годности круга – 1,5 года со дня изготовления.

Юридический адрес:

ОАО «Объединение Альфапластик»

Россия, 107150, Москва,

4-й проезд Подбельского, д.3

