



# Кружка Эсмарха резиновая

## КР-«Альфа» №1

ТУ 9398-037-00149535-2006

рег.уд.№ ФСР 2011/12149



ISO 9001:2008

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИ (ИЭ)

### 1 Назначение

Кружка Эсмарха предназначена для ухода за больными (для промываний и спринцеваний).

### 2 Эксплуатация

Перед применением кружку Эсмарха следует промыть в чистой проточной воде в течение 5 минут, затем прокипятить в 2-х % растворе соды пищевой (3 чайные ложки соды на 1 литр воды) в течение 30 минут, после кипячения в растворе соды промыть в проточной воде.

Перед использованием кружки конец трубки из ПВХ опустить на 1 минуту в горячую воду и надеть на наконечник, предварительно смазанный нейтральным жиром (вазелином, ланолином). После каждого использования наконечник следует промыть водой с мылом, ополоснуть чистой проточной водой.

В лечебных учреждениях кружку Эсмарха дезинфицируют промыванием горячей водой температурой  $50\pm 5^{\circ}\text{C}$  и выдерживают изделие в 1%-ном растворе хлорамина при температуре не ниже  $18^{\circ}\text{C}$  в течение  $30\pm 5$  минут, либо двукратно протирают изделие снаружи тампоном из марли, смоченным в том же дезинфицирующем растворе. Наконечник помещают в 3% раствор перекиси водорода на 80 минут.

### 3 Хранение

Кружку Эсмарха следует хранить в помещении при температуре от 0 до  $+25^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха не выше 80 %, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, защищённой от воздействия прямых солнечных лучей, масел, растворителей, кислот, щелочей и других веществ, разрушающих полимерный материал.

Срок годности кружки Эсмарха – 3,5 года со дня изготовления.

### Юридический адрес:

ОАО «Объединение Альфапластик»

Россия, 107150, Москва,

4-ый проезд Подбельского, д. 3

