



Спринцовка пластизольная
поливинилхлоридная для медицинских
процедур с двумя наконечниками СПП-«Альфа»

ISO 9001:2008



тип Б

ТУ 9398-033-00149535-2006

РУ № ФСР 2011/12235 от 03.11.2011 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Назначение

Спринцовка предназначена для медицинских целей, в том числе для ирригации (орошения) и отсоса жидкости из послеоперационной полости, в лечебных учреждениях и для индивидуального пользования.

2. Эксплуатация

Перед применением спринцовку дезинфицируют кипячением в воде (30+5) мин. Наконечник стерилизуют при полном погружении в 3% (по массе) раствор перекиси водорода на 80 минут, затем промывают в чистой проточной воде. Перед применением спринцовки наконечник смазывают нейтральным жиром (вазелином, ланолином). После каждого использования спринцовки наконечник и баллон промывают горячей водой с мылом, ополаскивают чистой проточной водой и просушивают.

Спринцовка не рекомендована к применению масел. Спринцовка стойка к действию водно-спиртовых растворов.

3. Хранение

Спринцовку следует хранить в помещении при температуре от 0 до плюс 25°C и относительной влажности воздуха не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Спринцовка не должна подвергаться действию прямых солнечных лучей, масел, растворителей, кислот, щелочей и других веществ, разрушающих изделие.

Срок годности спринцовки – 2 года со дня изготовления.

Юридический адрес:

ОАО «Объединение Альфапластик»

Россия, 107150, Москва,

4-й проезд Подбельского, д. 3

