



Судно резиновое подкладное для ухода за больными СРП-«Альфа»



ISO 9001:2008

ТУ 9398-034-00149535-2006, РУ № ФСР 2011/12153 от 20.10.2011

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Назначение

Судно резиновое подкладное предназначено для медицинских процедур.
Внешние размеры судна: длина — 430 мм; ширина — 350 мм.

2. Эксплуатация

Перед применением судно дезинфицируют погружением изделия в 1% по массе раствор хлорамина при температуре не ниже плюс 18°C на 30+5 мин. После дезинфекции изделие промывают проточной водой. В течении суток судно должно выдерживать не более трех дезинфекций.

Наполнить судно воздухом. Плотнo вставить пробку.

Максимальная нагрузка на судно 120 кг. Максимальное время нагрузки на изделие - 1 час.

3. Хранение

Судно следует хранить в помещении при температуре от 0 до плюс 25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м. от нагревательных приборов. Судно не должно подвергаться действию прямых солнечных лучей, масел, бензина, кислот, щелочей и других веществ разрушающих резину.

Срок годности судна – 1,5 года со дня изготовления.

Юридический адрес:

ОАО «Объединение Альфапластик»

Россия, 107150, Москва,

4-й проезд Подбельского, д.3

